




INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA CON EL DISPOSITIVO BODE EN SEDE JUDICIAL

Teléfonos de contacto 221- 4106400 (Int. 56508 ó 56509)

1. Completar el Formulario de Solicitud de Análisis de ADN Filiatorio.
2. Tomar uno de los dispositivos, abrir el envoltorio y rotular con código del vínculo (ver tabla), apellido y nombre de la persona que se va a tomar la muestra.

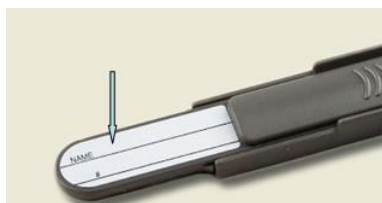

Ejemplo:

M – García Susana


P – Pérez, José

H – García, Matías

Vínculo	Código
Madre	M
Hijo/ Hija	HIJO/HIJA
Padre Alegado	P1
Padre Reconociente	P2
Abuela Materna	AAM
Abuelo Materno	AOM
Abuela Paterna	AA
Abuelo Paterno	AO
Madre de medio hermano/a	M2
Tío/Tia (*)	TIO/ TIA
Hermano/a (*)	HNO/HNA
Medio hermano/a (*)	MHNO/MHNA

(*) para estos vínculos, se debe detallar en el Formulario de Solicitud de Análisis de ADN filiatorio si son por vía materna o paterna. (leer información del Formulario: Glosario).

3. Entregar el dispositivo a la persona cuyos datos fueron incluidos en la etiqueta.
4. Para la toma de muestra, el titular deberá:
 - a. Deslizar el cobertor suavemente, de modo que quede libre la lengüeta de papel blanco para tomar la muestra.

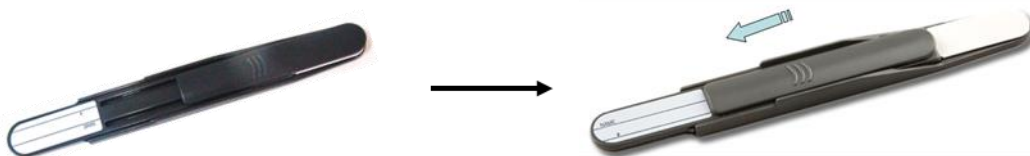

- b. Apoyar la parte blanca de papel, sobre la cara interna de la mejilla, en la parte posterior. **IMPORTANTE: ejercer una presión tal que la mejilla protruya levemente hacia afuera.**
- c. Desplazar desde la parte posterior hacia adelante tratando de barrer la superficie interna de la mejilla, realizando un “movimiento de barrido” **(no realizar movimientos en forma circular, tampoco de adelante para atrás).**
- d. Repetir el “movimiento de barrido” 7 veces.




- e. Cubrir la muestra desplazando la tapa corrediza hacia adelante



- f. Se adjunta Instructivo provisto por el fabricante del dispositivo para información más detallada: “Bode Collector instructivo”



5. Una vez tomada la muestra, colocar el dispositivo en un sobre rotulado con el nombre del titular, número de DNI, número de Expediente y el vínculo, aclarando si es vínculo conocido (vinculo indubitado) ó vínculo alegado (vinculo dubitado, vinculo a estudiar). NO INCLUIR MÁS DE UN DISPOSITIVO POR SOBRE.

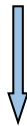

6. Cerrar y firmar el sobre, como se indica en la figura, por el funcionario judicial interviniente y la persona que se toma la muestra (o tutor del menor).

