

Instrucciones de Uso del Colector Bucal de ADN Bode

COMPONENTES DEL COLECTOR BUCAL DE ADN

- A. Base del mango
- B. Papel de colección
- C. Tapa deslizable




PARA USO EXCLUSIVO EN FORENSE / IDENTIFICACIÓN

NOTA: Por favor lea y siga las instrucciones


- Si Ud. está asistiendo a alguien, por favor lea y siga los pasos 1 a 6.
- Si Ud. está colectado su propio ADN, Ud. es el sujeto de los pasos 2 a 5.

Paso 1

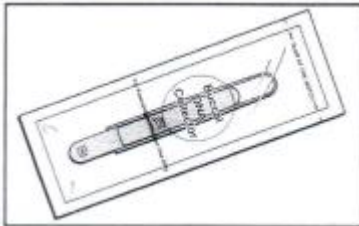

Remueva el colector bucal de ADN del envoltorio, sosteniendo el mango por la base. De ser necesario, mueva la tapa deslizable hacia atrás para exponer completamente el papel blanco de colección.

Paso 2

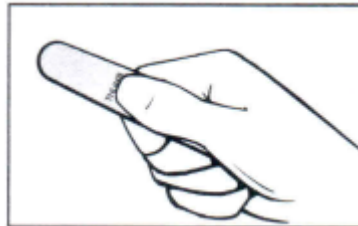

Instruya al sujeto a tomar el colector bucal de ADN ubicando el pulgar en el área marcada "Thumb" en la parte posterior. El sujeto no necesita usar guantes para coleccionar su propia muestra.

Paso 3



Instruya al sujeto a abrir la boca y colocar el lado blanco del papel de colección en forma plana contra la parte interna de la mejilla.

Paso 4




Con el papel de colección presionado contra la parte interna de la mejilla, solicite al sujeto que lo arrastre firmemente hacia los labios y fuera de la boca (Este movimiento es similar al juego de los niños cuando hacen sonidos con el dedo en la boca contra la mejilla.)

Paso 5



Repita el arrastre 7 veces más. NO frote el colector hacia atrás y adelante. No es un cepillo de dientes. NOTA: Es importante observar que el sujeto presione el papel de colección en forma plana contra la mejilla y que la mejilla protruya hacia afuera durante la colección.

Paso 6

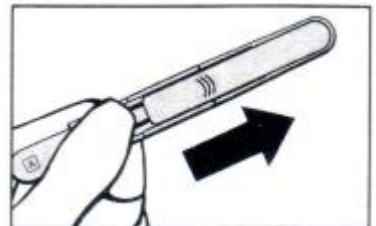

Empuje la tapa deslizable hacia adelante para cubrir el papel de colección.